


Pompa de irigare Endolinq JSFP-P1 - Ghid de utilizare

Mod de lucru

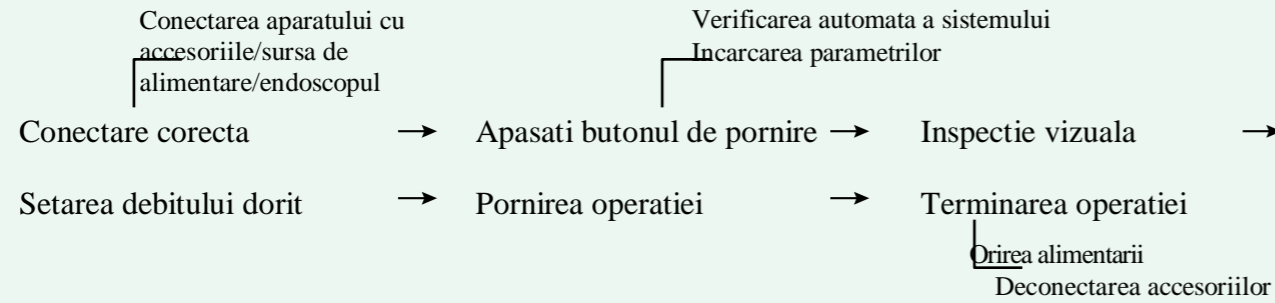


Nota: Inainte de folosire, asigurati-va ca este corecta conectarea la endoscop. Apasati pedala. Cand jetul de apa apare in capatul distal al endoscopului, eliberati pedala si alimentarea cu apa se va opri..


Atentionare

- Se recomandă verificarea anuală. Orice probleme suspectate trebuie analizate și excluse înainte de utilizare.
- Înainte de a utiliza seturile de apă canal auxiliar, vă rugăm să verificați modelul portului de apă auxiliar al endoscopului.
- Tubul și elementele obstrucționate sau nevalide pot pune în pericol pacienții și furnizorii de servicii medicale, chiar viața lor. Apa trebuie să fie sterilă sau soluție sterilă salină.
- Procedurile endoscopice trebuie efectuate de către personal calificat în tehnici endoscopice.

Interfata de utilizare

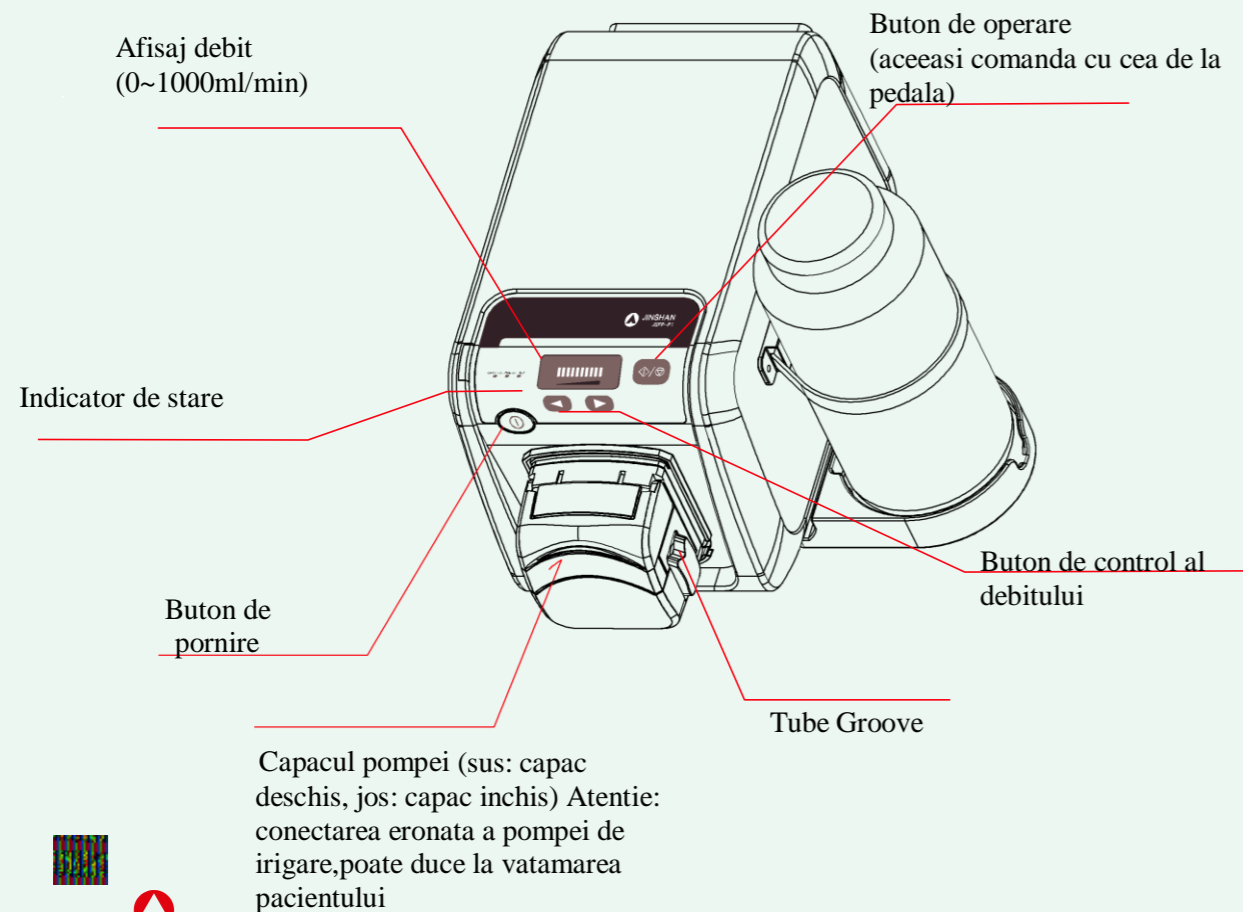

Conectarea endoscopului

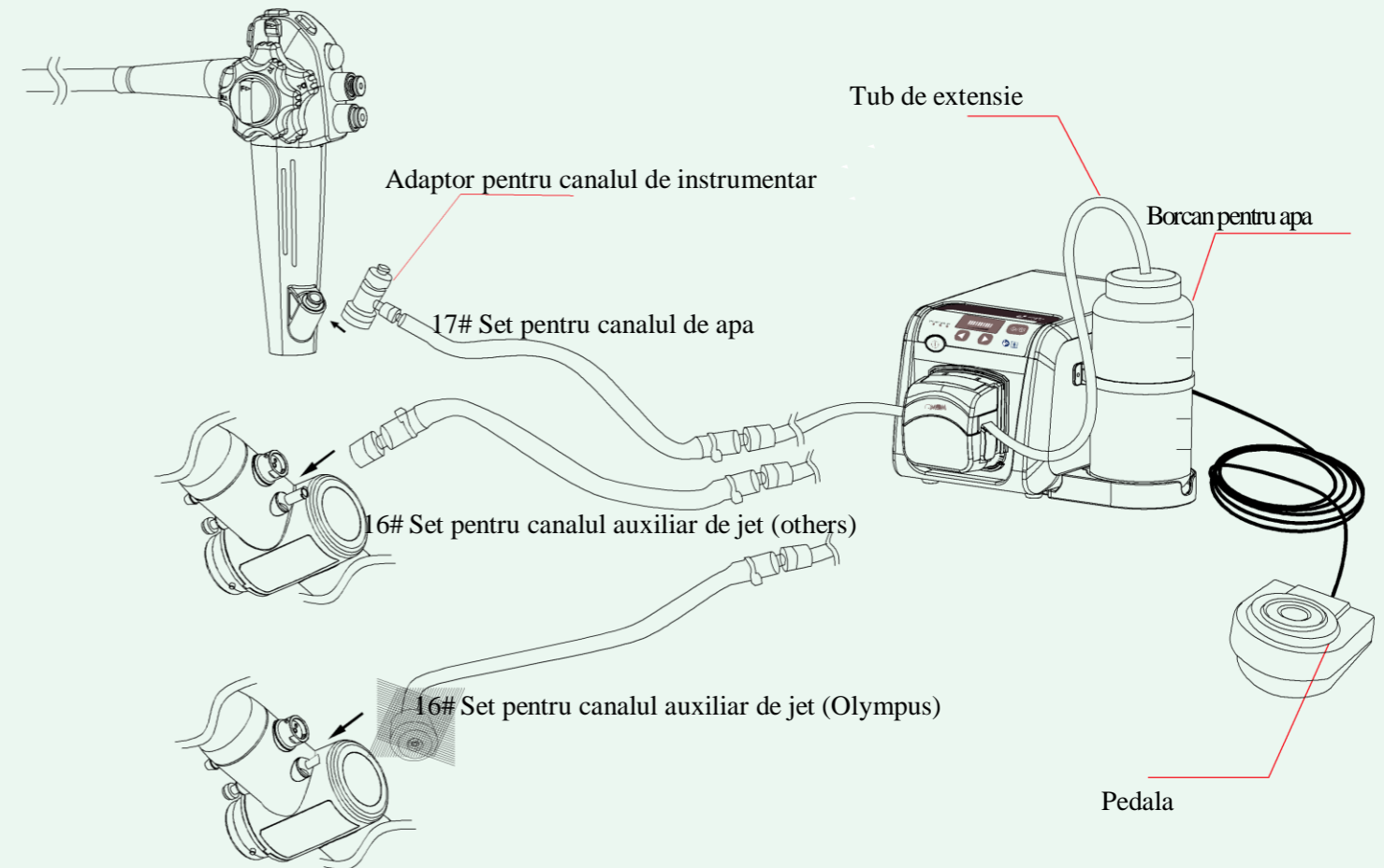

- Conectati adaptorul pentru canalul de instrumentar la portul acestuia si cu setul 17# "Instrument channel water".
- Conectati setul 16# "Auxiliary channel water (others)" la conectorul canalului auxiliar de jet al endoscopului
- Conectati setul 16# Auxiliary channel water (Olympus) la conectorul canalului auxiliar de jet al endoscopului Olympus.

Alimentarea cu apa

Prin actionarea pedalei sau a butonului de operare, se va pompa apa la capatul distal al endoscopului. Indicatorul ACT aprins – endoscopul este alimentat cu apa.

Indicatorul ACT stins – endoscopul nu este alimentat cu apa.

Timpul maxim de irigare: 20s±2s.

Irigarea se opreste automat dupa 20s.